

# Piattaforma SiDLY Care

---

## Manuale d'uso

1. Struttura della piattaforma SiDLY Care
2. Registrazione e creazione Account Manager
3. Creazione Account Utente
4. Configurazione del braccialetto
5. Modifica IMEI del braccialetto dell'utente
6. Creazione Account Operatore Sanitario
7. Visualizzazione grafica elenco utenti

# 1. Struttura della piattaforma SiDLY Care

## ACCOUNT MANAGER

- Gestione dei progetti
- Creazione di Account Operatori Sanitari
- Creazione di Account Utenti
- Assegnazione degli utenti ai caregiver
- Pianificazione del lavoro dei caregiver



## ACCOUNT OPERATORE SANITARIO

- Accesso alla piattaforma web e all'app mobile
- Gestione degli allarmi
- Configurazione dell'account utente (solo con l'autorizzazione dell'amministratore)
- Monitoraggio dei parametri vitali dell'utente
- Ricezione notifiche push




## ACCOUNT UTENTE

- Accesso alla piattaforma web e all'app mobile
- Visualizzazione dei propri parametri vitali



## 2. Registrazione e creazione Account Manager

Per iniziare, clicca sul link o copia l'indirizzo riportato di seguito e incollalo nel tuo browser → <https://sidly-platform.com/auth/register>

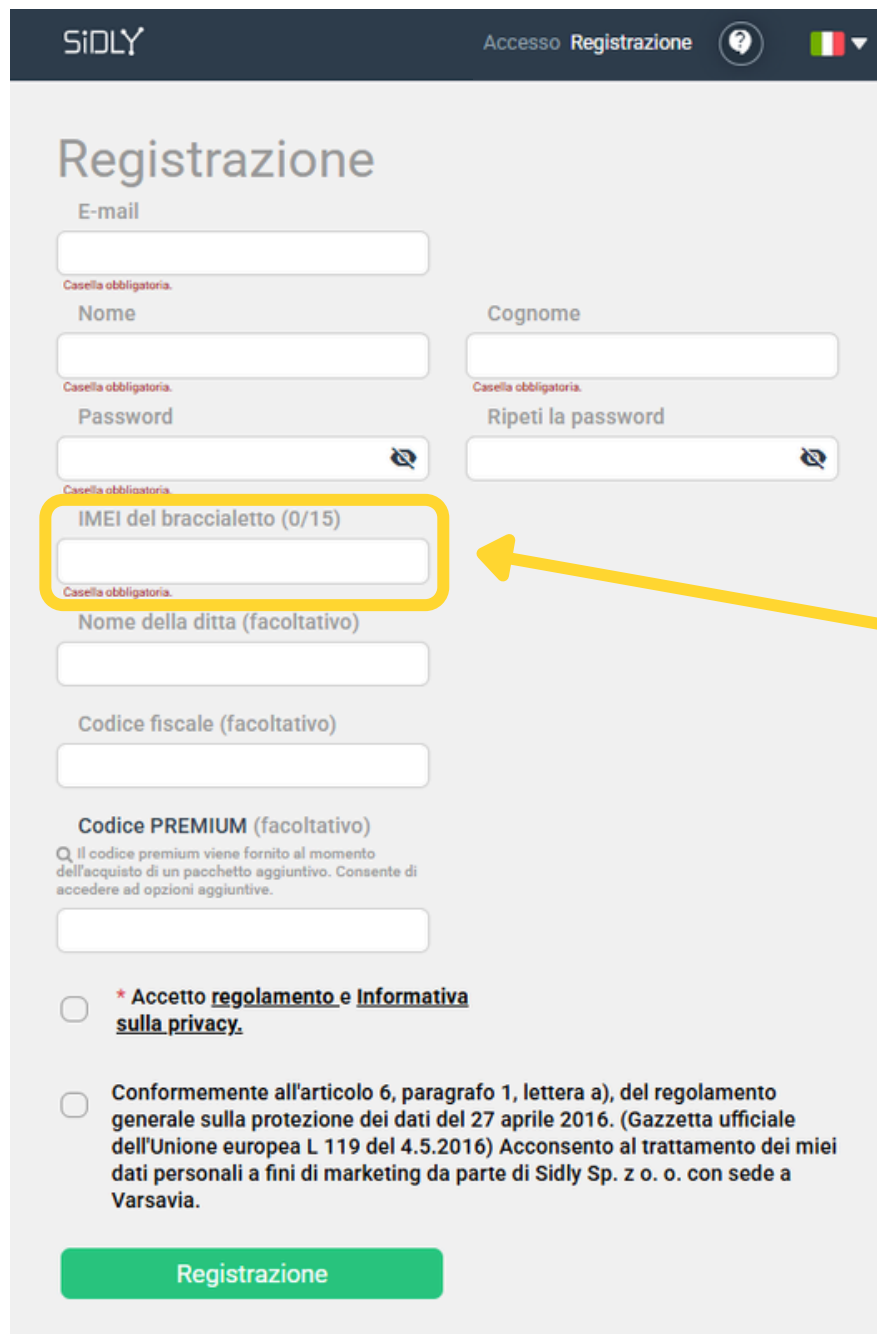

⚠ 1. Clicca sull'icona della bandiera e seleziona la lingua

2. Compila i campi obbligatori

- E-mail
- Nome
- Cognome
- IMEI del braccialetto

Il numero IMEI (15 cifre) si trova sul retro della confezione SIDLY

3. Crea una password




4. Accetta il regolamento e l'informativa sulla privacy

5. Clicca sul tasto verde "Registrazione"

**N.B.** Compilando il form di registrazione e cliccando sul tasto verde "Registrazione", verrà creato automaticamente un **Account Manager**

### 3. Creazione Account Utente

La creazione dell'**Account Manager** ti permette di aggiungere un **Account Utente**.

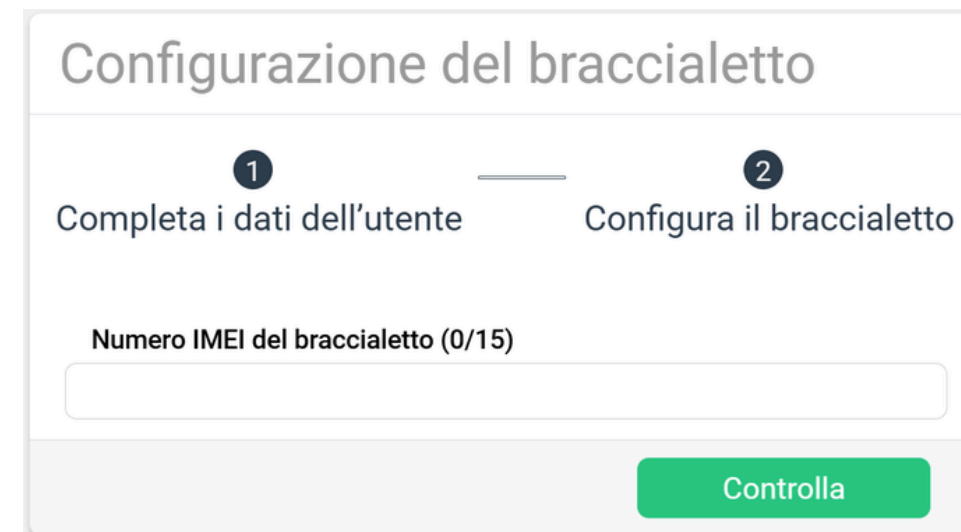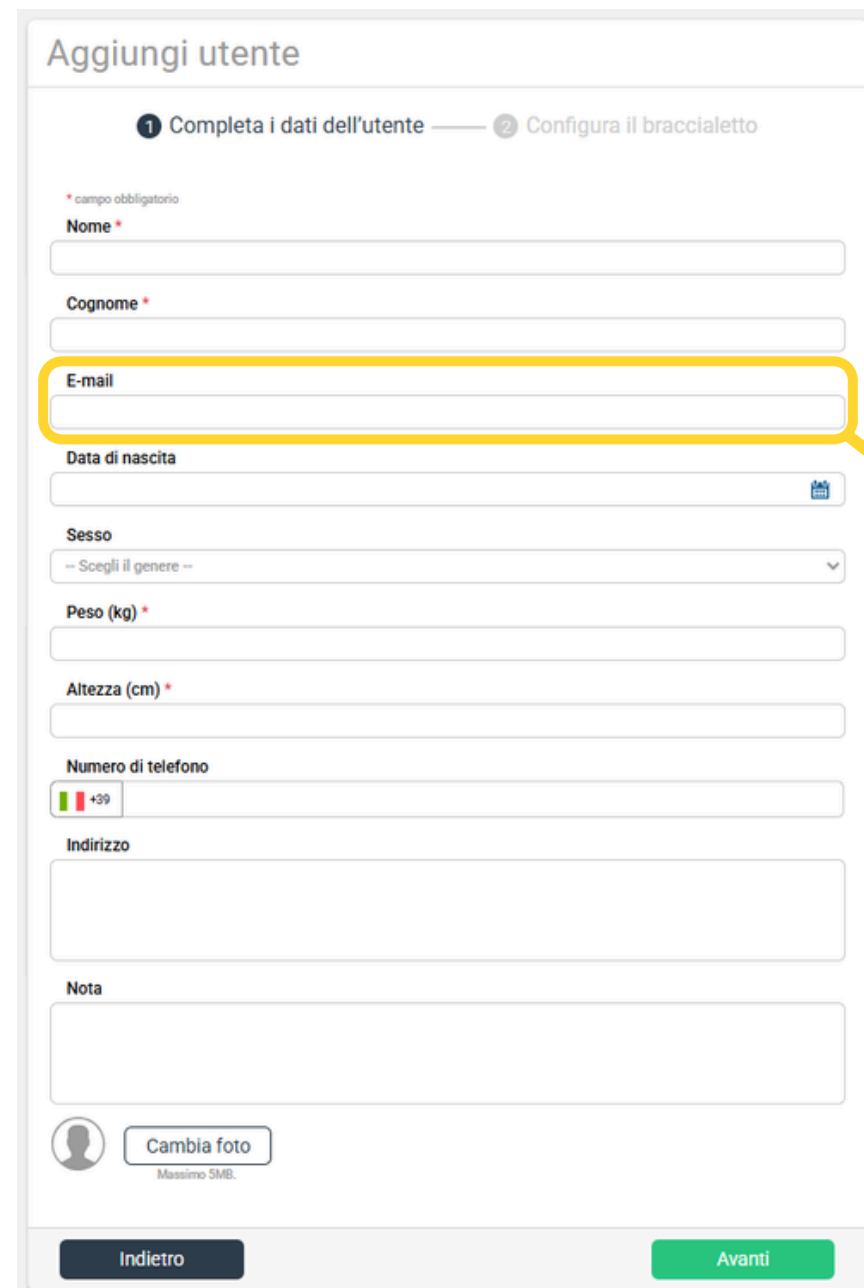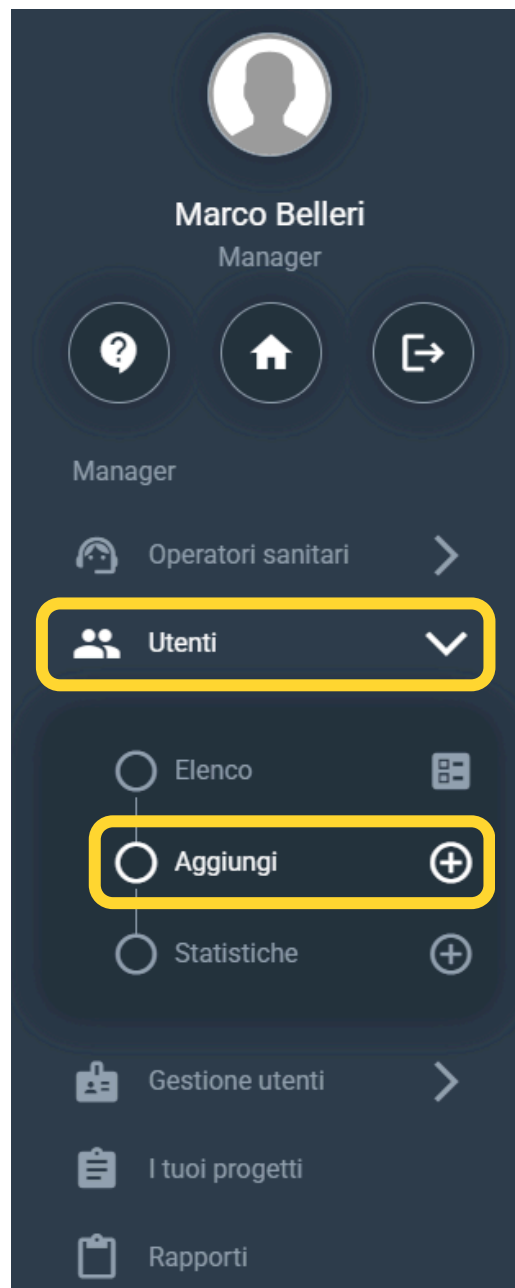

3. **Inserisci il numero IMEI**
4. **Clicca sul tasto verde "Controlla"**

In fase di creazione dell'**Account Utente**, è possibile inserire anche l'indirizzo e-mail dell'utente. Ciò consentirà all'utilizzatore del bracciale di accedere autonomamente alla piattaforma web e all'app mobile per monitorare i propri parametri.

Per accedere, l'utente dovrà utilizzare la password inviata automaticamente al suo indirizzo e-mail al momento della registrazione. Al primo login, l'utente dovrà accettare il regolamento e l'informativa sulla privacy.

**N.B.** L'**Account Utente** consente solo la visualizzazione dei dati. Ogni modifica è disabilitata.







1. **Compila i campi obbligatori con i dati dell'utente utilizzatore**
2. **Clicca sul tasto verde "Avanti"**



## 4. Configurazione del braccialetto

Dopo aver creato l'**Account Utente**, dall'**Account Manager** potrai impostare:

- I numeri di telefono da chiamare in caso di situazioni di emergenza
- La lingua in cui desideri ricevere i messaggi vocali
- I parametri da monitorare
- La frequenza delle misurazioni automatiche
- I valori minimi e massimi delle misurazioni per ricevere una notifica quando vengono superati
- Il perimetro virtuale per il Geofencing

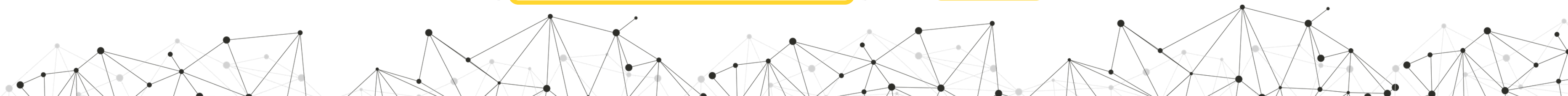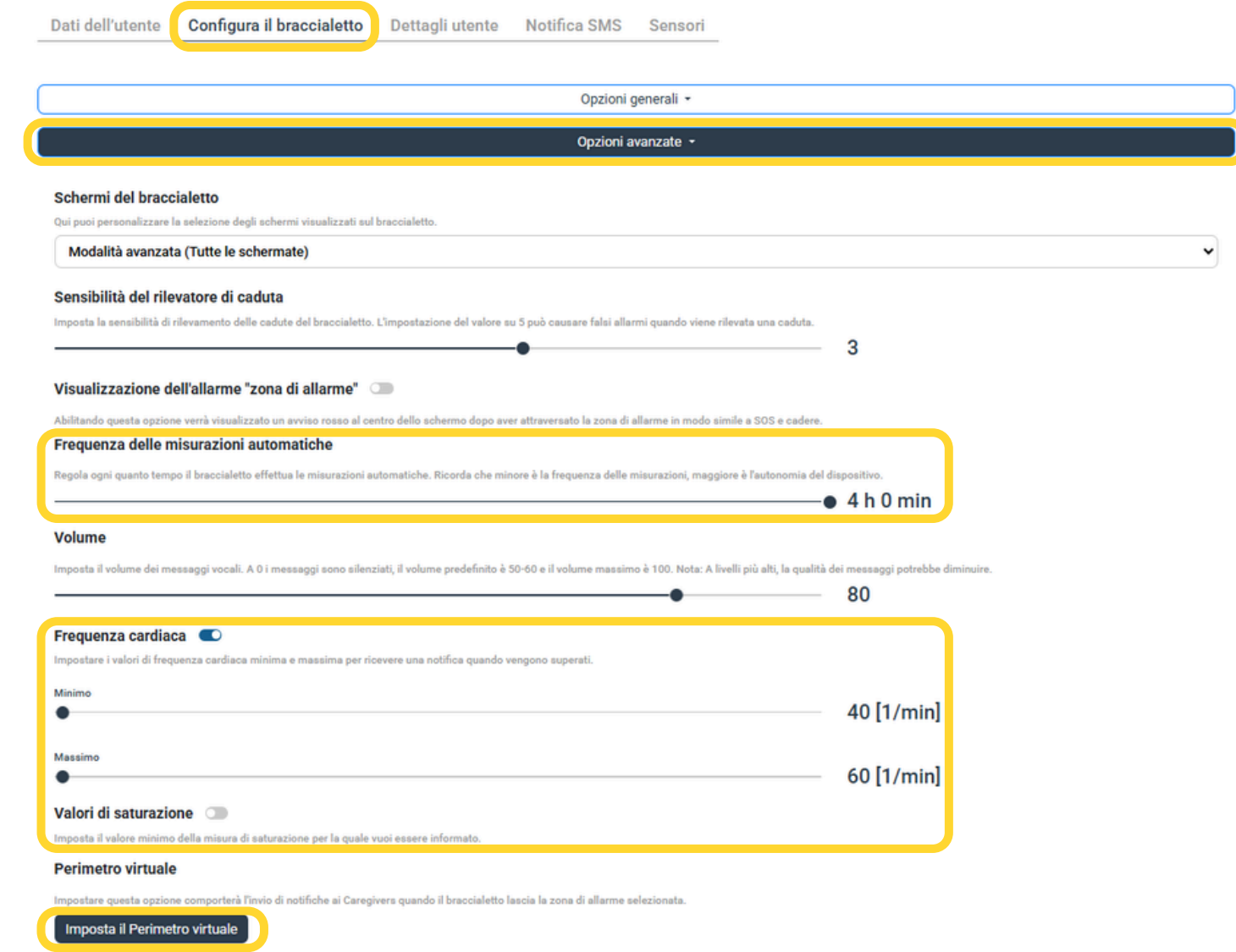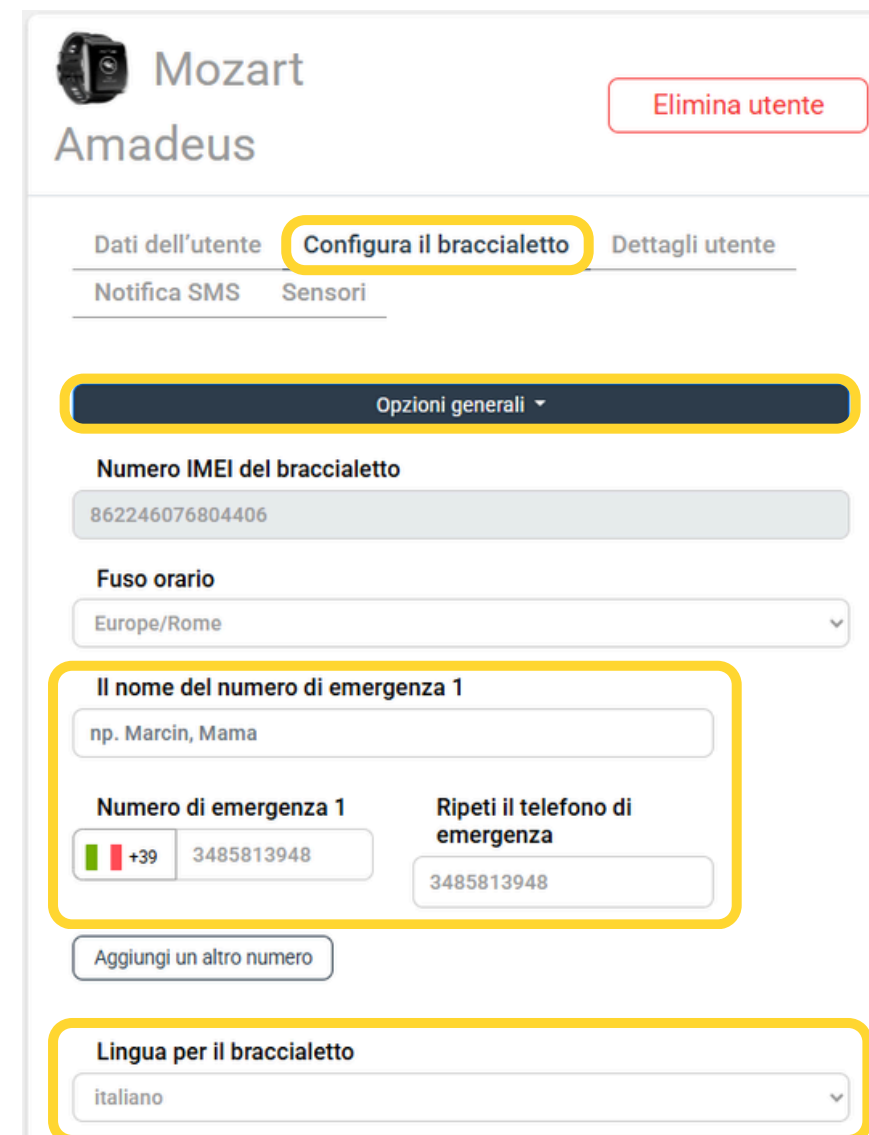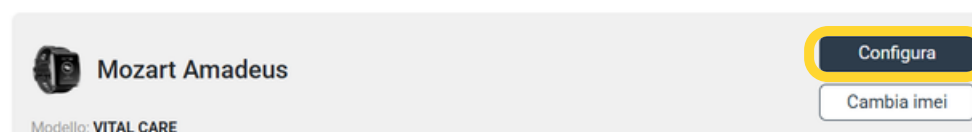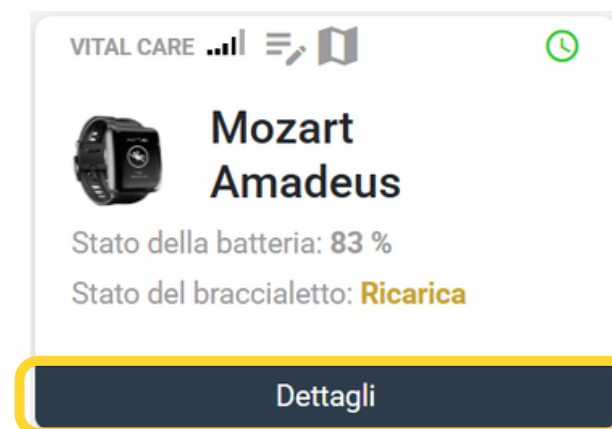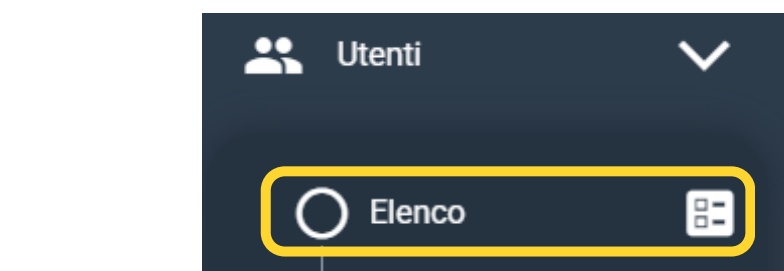

## **Il bracciale è ora pronto per l'utilizzo!**


---

In caso di emergenza, verrà inoltrata una chiamata ai contatti impostati come numeri di emergenza.


## 5. Modifica IMEI del braccialetto dell'utente

In caso di guasto o malfunzionamento, puoi sostituire il bracciale senza perdere i dati dell'utente.


*In che modo?* Modificando il codice IMEI da 15 cifre.

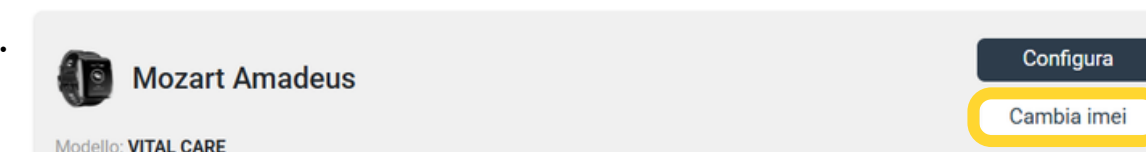


1. **Inserisci il numero IMEI attuale del braccialetto**
2. **Clicca sul tasto verde "Ulteriore"**

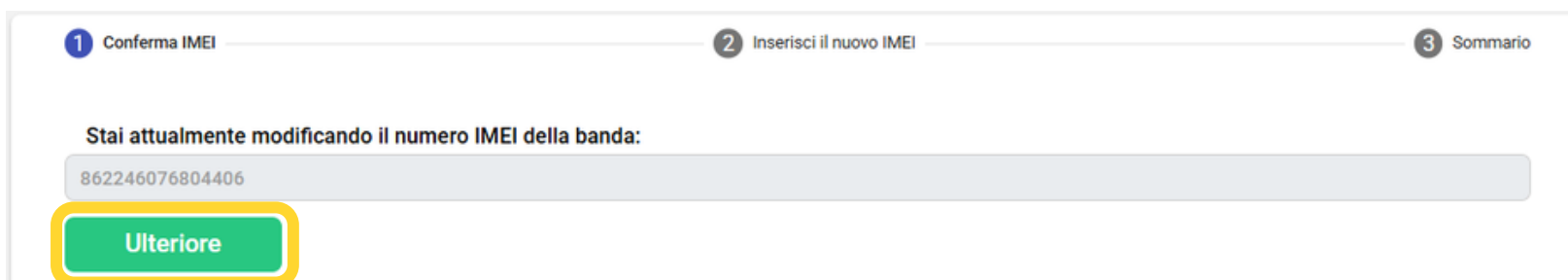

3. **Inserisci il numero IMEI del nuovo braccialetto**
4. **Clicca sul tasto verde "Controlla"**

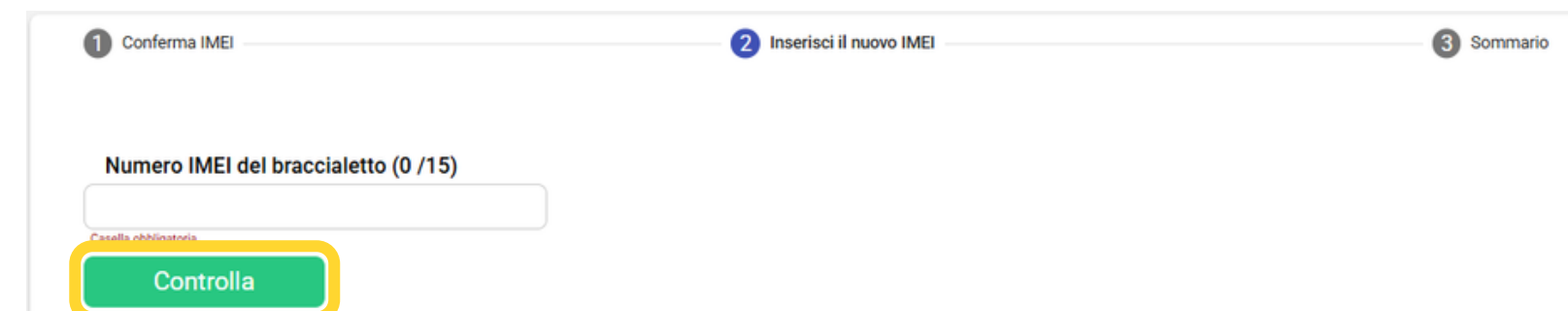

5. **Clicca sul tasto verde "Cambia"**

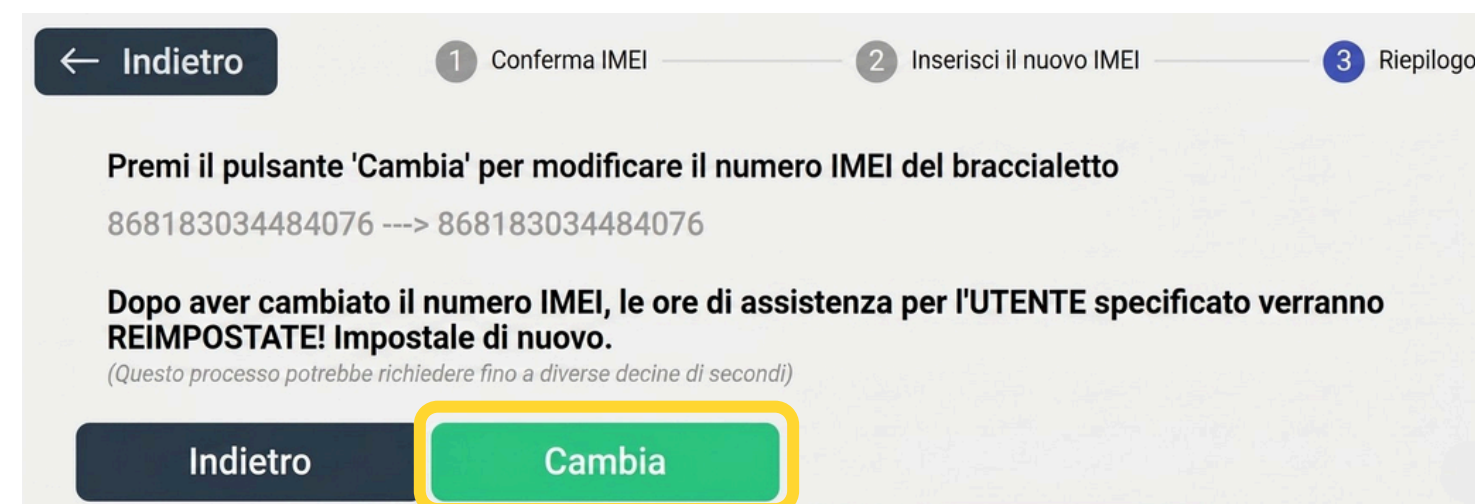

**N.B.** La modifica del numero IMEI è possibile solo se quello nuovo non è assegnato a un altro **Account Utente**.




## 6. Creazione Account Operatore Sanitario

L'**Account Manager** ti permette di creare uno o più **Account Operatore Sanitario**.

Se la registrazione dell'**Account Operatore Sanitario** è andata a buon fine, il caregiver riceverà una e-mail con la password per accedere alla piattaforma web e all'app mobile. Al primo login, il caregiver dovrà accettare il regolamento e l'informativa sulla privacy.

Tramite l'**Account Manager**, sarà poi possibile assegnare uno o più **Account Utente** ad ogni **Account Operatore Sanitario**, così che il caregiver possa monitorare lo stato di salute degli utenti a lui assegnati.

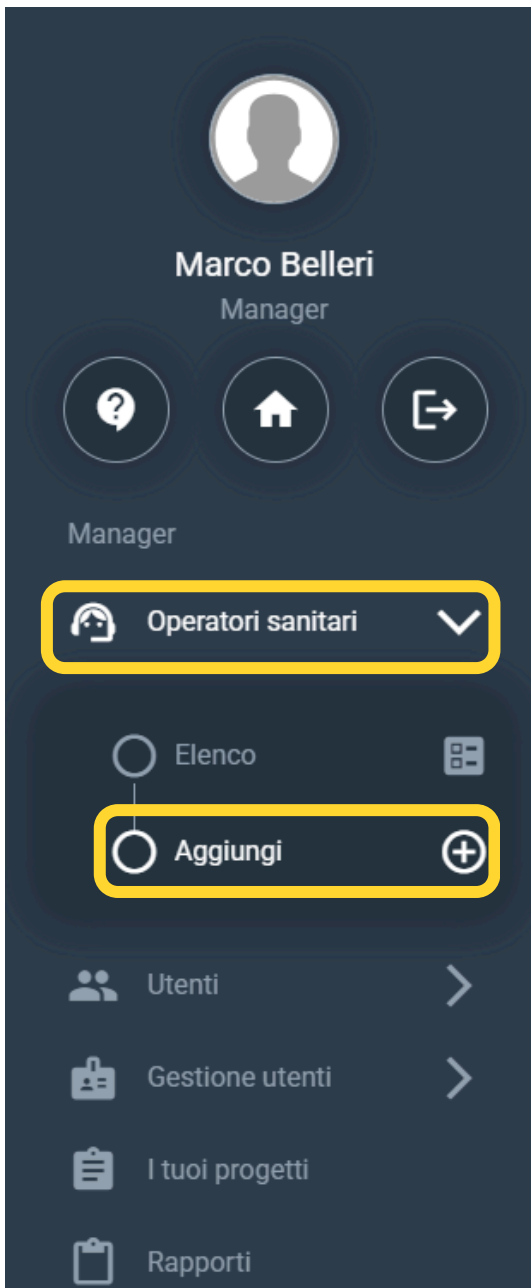


### Aggiungi operatore sanitario

\* campo obbligatorio

Nome \*

Cognome \*

Telefono \*


 +39

Email \*


Data di nascita

Fuso orario

Europe/Rome

 **Aggiungi foto**  
Massimo 5MB.


**Aggiungi operatore sanitario**

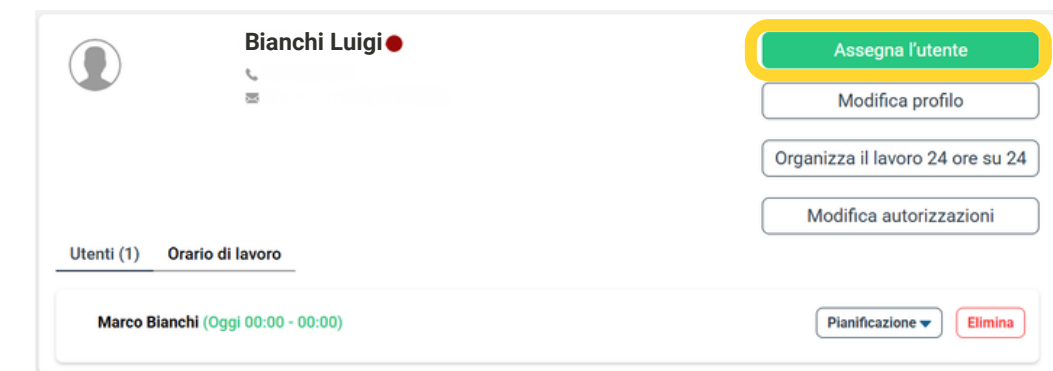


1. **Compila i campi obbligatori con i dati del caregiver**
2. **Clicca sul tasto verde "Aggiungi operatore sanitario"**



# 6. Visualizzazione grafica elenco utenti

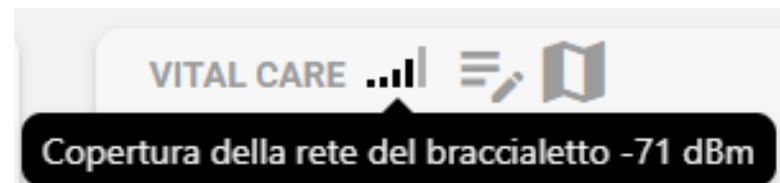

Potenza del segnale

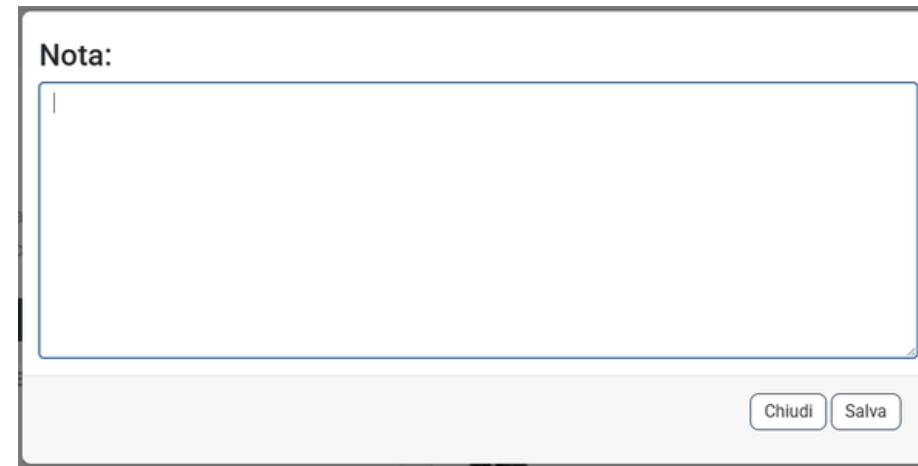


Aggiungere / visualizzare una nota




Localizzazione su mappa

Ultima attività del braccialetto

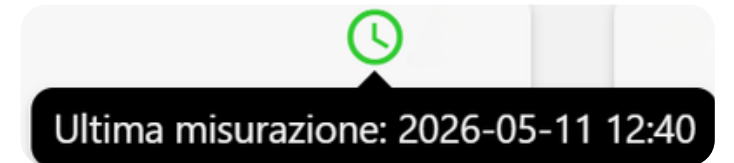

Tipologia di braccialetto

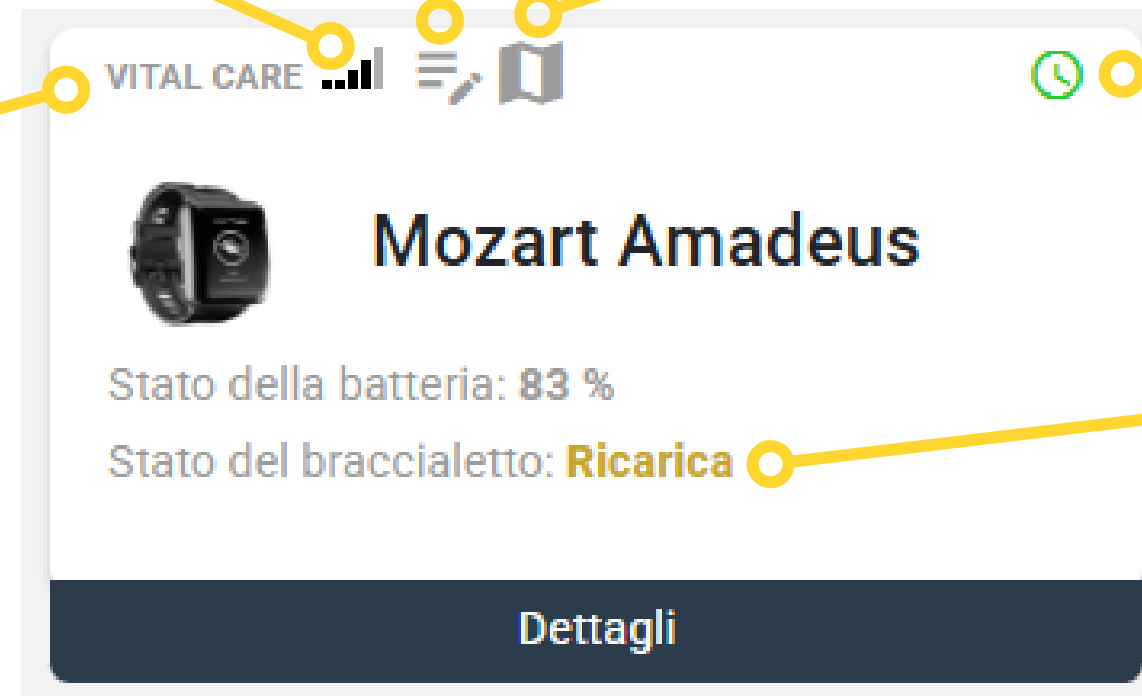

Stato del braccialetto

- Indossato** → il braccialetto è indossato al polso
- Ricarica** → il braccialetto è in carica
- Non attivo** → il braccialetto è inattivo
- Rimosso** → il braccialetto è attivo ma non indossato

