

SIDLYCARE | PRO

Passo #1

Prima dell'uso caricare completamente il dispositivo (circa 3 ore).

Per caricare il braccialetto collegalo alla basetta di ricarica, in modo che il **punto rosso** sul fondo del braccialetto tocchi il **punto rosso** sulla basetta.



caricamento in corso




braccialetto carico

Passo #2

Metti il braccialetto al polso.

Posiziona il braccialetto sopra l'osso del polso (circa 2-3 cm di distanza). Ciò garantirà la massima precisione delle misurazioni.

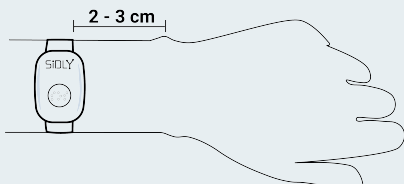

Passo #3

Ora puoi godere pienamente delle funzionalità del dispositivo e del sistema SidLY

Sentiti sicuro grazie alle funzionalità del braccialetto:



Misurazione di polso e saturazione



Pulsante SOS



Rilevatore di caduta



Comunicazione bilaterale




Posizione dell'utente

Passo #4

In caso di pericolo di vita o di salute, premi il pulsante SOS fino a quando diventa ROSSO.

- sentirai il messaggio: „invio del messaggio SOS“;
- il pulsante SOS diventerà rosso;
- l'allarme sarà trasmesso al sistema di teleassistenza SIDLY.

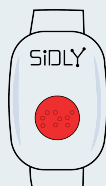

Attenzione!

Indossa sempre il braccialetto al polso.
Toglilo solo per fare la doccia o per caricarlo.

Il braccialetto deve aderire al polso, ma allo stesso tempo essere comodo. Il braccialetto troppo largo può compromettere la qualità delle misurazioni.

Regolarmente carica il braccialetto posizionandolo sulla stazione di ricarica.

Applicazione mobile

Scarica l'app SiDLY Care e monitora la tua attività, così come le misurazioni effettuate dal braccialetto.



Per scaricare l'applicazione, cerca l'app sul Google Play Store (Android) o sull'App Store (iOS).
L'applicazione è gratuita su entrambi i negozi.

In caso di problemi puoi sempre leggere il manuale d'uso.

Le istruzioni complete sono in formato elettronico sul sito:

www.sidly.eu/manual/istruzioniCarePro.pdf

Attenzione!

Il braccialetto genera i segnali luminosi e acustici per indicare l'attività delle sue funzionalità.

Segnali luminosi del braccialetto:

diodo lampeggiante

- | | |
|--|--|
| | dispositivo funziona correttamente |
| | braccialetto carico, bassa copertura di rete GSM |
| | basso livello di carica della batteria |
| | basso livello di carica della batteria e bassa copertura GSM |
| | aggiornamento del software, lascia il dispositivo nella bassetta |

In caso di domande, contattaci all'indirizzo:

