

Chiamata di soccorso:

Caro Utente, se:



ti senti
male



hai bisogno
di assistenza



sei in
pericolo

ALLORA PREMI E TIENI PREMUTO IL PULSANTE SOS

Cosa succederà dopo?

1. Sentirai una conferma verbale "invio messaggio SOS".
 2. Il pulsante SOS diventerà **rosso**.
 3. Si stabilirà una connessione vocale con un Assistente.
- Se non hai sentito "invio messaggio SOS" e non riesci a vedere la luce rossa, PREMI E TIENI PREMUTO nuovamente il pulsante SOS.






Ricorda:

Indossa sempre il braccialetto al polso. Toglilo solo per fare la doccia o per caricarlo.

Segnali luminosi e vocali del braccialetto:

Il braccialetto genera i segnali luminosi e acustici per indicare l'attività delle sue funzionalità.

-  Un diodo verde lampeggiante significa che il dispositivo funziona correttamente.
-  Un diodo rosso lampeggiante indica un livello di batteria basso.
-  Il diodo rosso rimarrà acceso dopo che il pulsante SOS è stato premuto.

Rispondere alle chiamate utilizzando il braccialetto:

Una chiamata in arrivo dall'Assistente farà sì che il dispositivo inizi a emettere una suoneria e il diodo lampeggerà in bianco.

Per rispondere alla chiamata, premi e tiene premuto il pulsante SOS finché la suoneria non si interrompe. Puoi iniziare a parlare in quel momento.




Prima di segnalare un guasto, ci sono alcune cose che puoi fare:

assicurati che i sensori siano puliti • collega il caricatore • premi il pulsante SOS

Istruzioni per la ricarica

1. Assembla il caricatore e collegalo a una fonte di alimentazione elettrica.

- collega il cavo USB al caricatore
- la presa USB si trova sul lato del caricatore

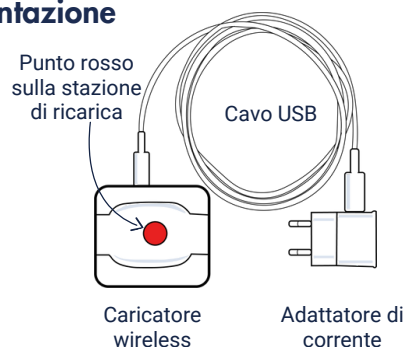

2. Posiziona il braccialetto sulla stazione di ricarica

- il punto sulla parte inferiore del braccialetto dovrebbe allinearsi con il punto sul caricatore wireless



3. Ricarica

- dopo 30 secondi, il pulsante SOS sul braccialetto si illuminerà in verde e rosso
- il braccialetto sarà completamente carico dopo circa 3 ore
- se nessun diodo del braccialetto si accende dopo 30 secondi, controlla l'allineamento del braccialetto sulla stazione di ricarica
- se tutti i diodi del braccialetto sono spenti, attendi circa 20 minuti e premi il pulsante SOS: il braccialetto dovrebbe accendersi



4. Carica del braccialetto completata

- una volta che la batteria è completamente carica, il braccialetto emetterà un messaggio vocale "batteria completamente carica"
- l'intero pulsante SOS si illuminerà in verde



5. Il braccialetto è pronto per essere indossato

- rimuovi il braccialetto dal caricatore, ora è pronto per essere utilizzato
- se il braccialetto è ancora molto caldo, aspetta un po' prima di indossarlo